




Checkliste für Top-Modelle



WERKSTOFF
TECHNOLOGIE

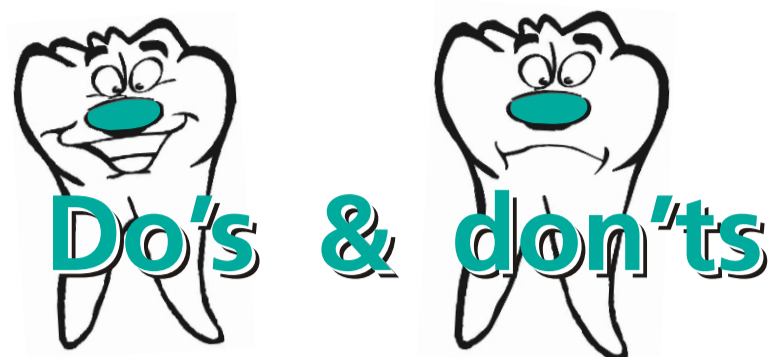

... bei Abdrücken

- ✓ Einmalhandschuhe beim Auspacken tragen
- ✓ Alginat- und Hydrokolloidabdrücke stets feucht halten (z.B. in ein feuchtes Tuch wickeln und in eine Plastiktüte legen)
- ✓ Abdruck gründlich auswaschen
- ✓ gründlich desinfizieren (Alginat- und Hydrokolloidabdrücke nie mit lösungsmittelhaltigen Desinfektionen behandeln)
- ✓ Desinfektion hinterher mit klarem Wasser abwaschen
- ✓ Abdruck für Modellherstellung vorbereiten (z.B. Teile auswachsen, Abdruck beschneiden)

... beim Rühren

- ✓ nur sauberes und trockenes Werkzeug verwenden
- ✓ nur entmineralisiertes Wasser verwenden
- ✓ Gipse nie mit Zusätzen wie Trimmerwasser oder Gipshärter versetzen
- ✓ Gips und Wasser genau dosieren
- ✓ Gips unter Vakuum anrühren, empfohlene Rührgeschwindigkeit und -zeit einhalten

... beim Ausgießen

- ✓ Rüttler auf schwächste Stufe stellen
- ✓ Oberfläche des Rüttlers sauber und glatt halten
- ✓ Löffel flächig auflegen, dabei Kontakt des Abdruckmaterials mit dem Rüttler vermeiden
- ✓ Gips nur von einer Seite einlaufen lassen
- ✓ Arbeitsplatz und Werkzeug sofort nach Gebrauch reinigen

ALGINATE

Reparaturen	Gegenbisse	Kunststoffprothetik	Modellguss
(Bitte eintragen!) verwendeter Gips: _____	(Bitte eintragen!) verwendeter Gips: _____	(Bitte eintragen!) verwendeter Gips: _____	(Bitte eintragen!) verwendeter Gips: _____
z.B. SHERAALPIN Mischungsverhältnis 100 g : 30 ml	z.B. SHERAPREMIUM Mischungsverhältnis 100 g : 20 ml	z.B. SHERAPLASTER Mischungsverhältnis 100 g : 30 ml	z.B. SHERAPREMIUM Mischungsverhältnis 100 g : 20 ml

EINARTIKULIEREN
(Bitte eintragen!) verwendeter Gips: _____
z.B. SHERAARTI Mischungsverhältnis 100 g : 30 ml

SILIKONE & POLYÄTHER

Modellguss	Edelmetalltechnik
(Bitte eintragen!) verwendeter Gips: _____	(Bitte eintragen!) verwendeter Gips: _____
z.B. SHERAPREMIUM Mischungsverhältnis 100 g : 20 ml	z.B. SHERAMAXIMUM 2000 Mischungsverhältnis 100 g : 20 ml

HYDROKOLLOIDE

Edelmetalltechnik
(Bitte eintragen!) verwendeter Gips: _____
z.B. SHERAPRIMA Mischungsverhältnis 100 g : 20 ml

SOCKELN
(Bitte eintragen!) verwendeter Gips: _____
z.B. SHERASOCKEL-FLÜSSIG Mischungsverhältnis 100 g : 23 ml



Grundsätzlich gilt...

Abdampfen

- ✓ am besten vermeiden
- ✓ Düsenabstand sollte mindestens 10 cm betragen
- ✓ um die Gipse nicht zu überhitzen, in Intervallen arbeiten

Sägen

- ✓ am besten nach 2 Stunden
- ✓ auf werkzeugspezifische Drehzahl achten
- ✓ Schnitte parallel zum Pin sägen

Nasstrimmen

- ✓ spätestens 2 Stunden nach der Entformung

Trockentrimmen

- ✓ möglichst 2 bis 10 Stunden nach der Entformung