




SHERAFINA®-RAPID

Empfohlene Mischungsverhältnisse von Einbettmassenpulver : SHERALIQUID

Unsere Empfehlungen basieren auf Testergebnissen unseres Labors und sind Richtwerte. Verschiedene Faktoren vor Ort wie z. B. die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit oder die Ein-

stellungen des Rührgerätes können die Ergebnisse beeinflussen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. Bei technischen Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Für einen Einbettmassenbeutel à 160 g benötigen Sie insgesamt 42 ml Flüssigkeit. Die Abmischung der Flüssigkeit entnehmen Sie bitte dieser Tabelle:

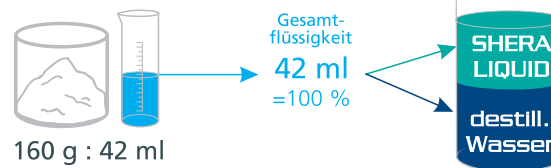

Metalle	Stiftaufbau & Inlay	Wachskronen	Teleskope modelliert in Kunststoff	Konuskronen modelliert in Kunststoff
Hochgoldhaltige Legierung 70 % - 80 % Au	18 ml + 24 ml 42 % + 58 %	20 ml + 22 ml 47 % + 53 %	25 ml + 17 ml 60 % + 40 %	24 ml + 18 ml 58 % + 42 %
Goldreduzierte Legierung 55 % - 65 % Au	18,5 ml + 23,5 ml 44 % + 56 %	21 ml + 21 ml 50 % + 50 %	28,5 ml + 13,5 ml 68 % + 32 %	27 ml + 15 ml 65 % + 35 %
Palladium-Basis-Legierung		28,5 ml + 13,5 ml 68 % + 32 %	35 ml + 7 ml 84 % + 16 %	33 ml + 9 ml 79 % + 21 %
NEM-Legierung		38 ml + 4 ml 90 % + 10 %	38 ml + 4 ml (10%) 90 % + 10 % SHERA LIQUID-EXTRA oder Gesamtflüssigkeit reduzieren auf 38 ml = 100% SHERALIQUID	
	SHERA LIQUID + dest. Wasser	SHERA LIQUID + dest. Wasser	SHERA LIQUID + dest. Wasser	SHERA LIQUID + dest. Wasser