

Designparameter Exocad

SHERAprint-model plus UV sand / grey



Modellgestaltung mit Modelltyp „Demo Occlusal Plane without plate“




Designparameter Exocad

SHERAprint-model plus UV sand / grey



Stumpfgestaltung

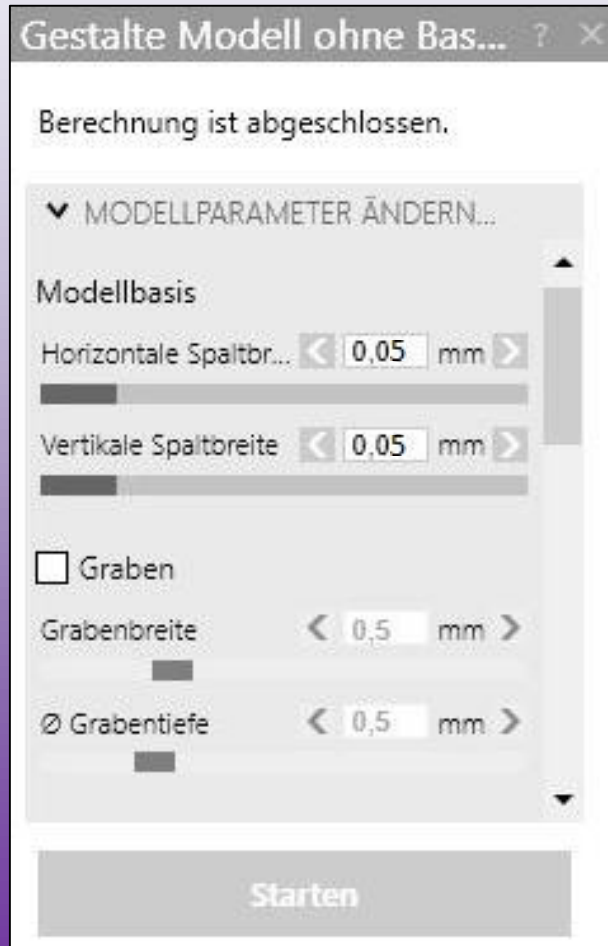

Modellbasis

Horizontale Spaltbreite: 0,05 mm

Vertikale Spaltbreite: 0,05 mm

Graben: deaktivieren

Designparameter Exocad

SHERAprint-model plus UV sand / grey



Stumpfgestaltung

Wizard Gestalte Modell ohne Basisplatte ?

Berechnung ist abgeschlossen.

▼ MODELLPARAMETER ÄNDERN...

Dies

Pinhöhe mm

Extrusion der Präpa... mm

Breite der Auflagefl... mm

Die-Pins auslassen

Unterkehlung

Entnahnehilfe

Starten

Dies

Pinhöhe: 2 mm
Extrusion der Präparation: 0 mm
Breite der Auflagefläche: 1 mm

Die-Pins auslassen: aktivieren
Unterkehlung: optional
Entnahnehilfe: deaktivieren

Designparameter Exocad

SHERAprint-model plus UV sand / grey



Stumpfgestaltung

Wizard Gestalte Modell ohne Basisplatte ?

Berechnung ist abgeschlossen.

▼ MODELLPARAMETER ÄNDERN...

Tiefe < 1 mm >

Hohles Modell

Wandstärke < 2 mm >

Kleinsten Hohlraum... < 0 mm >

Fräsbares Modell

Fräskopfdurchmess... < 1,2 mm >

Starten

Tiefe: 1 mm

Hohles Modell: aktivieren

Wandstärke: 2 mm

Kleinsten Hohlraum: 0 mm

Fräsbares Modell: deaktivieren