

# Designparameter Exocad für Druckdienstleistung




Modellgestaltung mit Modelltyp „Demo Occlusal Plane without plate“



# Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



## Stumpfgestaltung

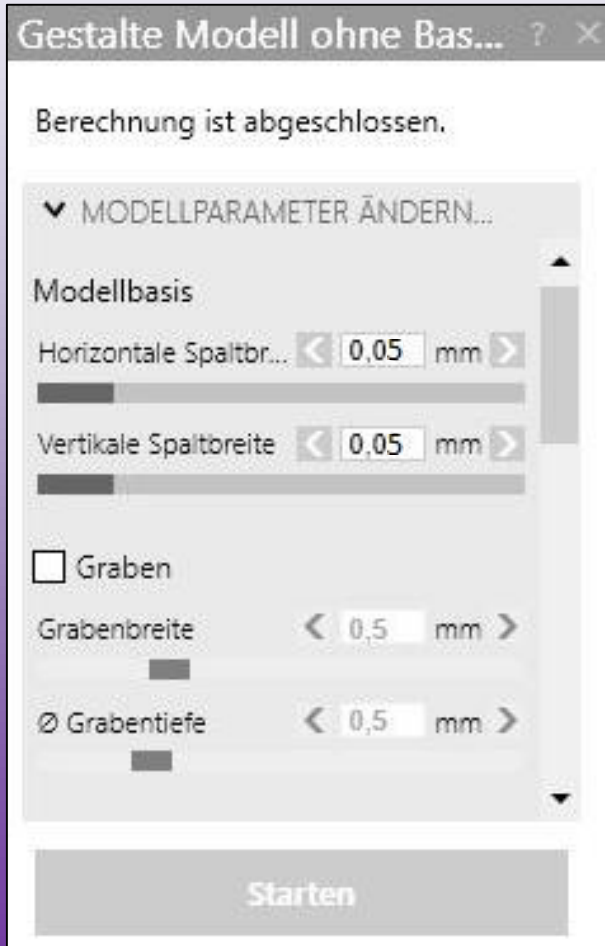

	SHERAprint model plus		SHERAprint model UV
	Grey	Sand	smoky white
Modellbasis			
Horizontale Spaltbreite	0,03 mm	0,03 mm	0,06 mm
Vertikale Spaltbreite	0,03 mm	0,03 mm	0,06 mm
Graben	deaktivieren	deaktivieren	deaktivieren

# Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



## Stumpfgestaltung

Wizard Gestalte Modell ohne Basisplatte ?

Berechnung ist abgeschlossen.

▼ MODELLPARAMETER ÄNDERN...

Dies

Pinhöhe  mm

Extrusion der Präpa...  mm

Breite der Auflagefl...  mm

Die-Pins auslassen

Unterkehlung

Entnahnehilfe

Starten

### Dies

Pinhöhe: 2 mm  
Extrusion der Präparation: 0 mm  
Breite der Auflagefläche: 1 mm

Die-Pins auslassen: aktivieren  
Unterkehlung: optional  
Entnahnehilfe: deaktivieren

# Designparameter Exocad für Druckdienstleistung



## Stumpfgestaltung

Wizard Gestalte Modell ohne Basisplatte ?

Berechnung ist abgeschlossen.

▼ MODELLPARAMETER ÄNDERN...

Tiefe < 1 mm >

Hohles Modell

Wandstärke < 2 mm >

Kleinsten Hohlraum... < 0 mm >

Fräsbares Modell

Fräskopfdurchmess... < 1,2 mm >

Starten

Tiefe: 1 mm

Hohles Modell: aktivieren

Wandstärke: 2 mm

Kleinsten Hohlraum: 0 mm

Fräsbares Modell: deaktivieren